

SKUMINDSATS TIL SENGEHEST

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at afskærme motoriske urolige borgere mod sengehestene. Motorisk urolige borgere har øget risiko for at støde ind i sengehesten eller få skubbet VENDLET lagnet til side, så hænder eller fødder kan komme i klemme.

Skumindsatsen er let at montere og kører nemt med sengehesten op og ned. Skumindsatsen monteres inde i sengehesten og påvirker derefter ikke den daglige brug af VENDLET.

Skumindsatsen passer til følgende VENDLET-modeller:

- VENDLET V5S
- VENDLET V5S+
- VENDLET V5S Speed Adjust
- VENDLET V5S+ Speed Adjust




Varenr.: 1700009
HMI-nr.: 102488
Pris Kr. 990 ex. moms

Sættet består af:

- 2 stk. PE-skumplader
- 16 stykker burrebånd

Monteringsvejledning

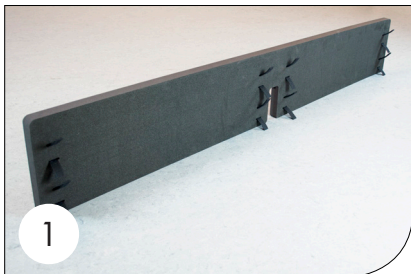

1



2



3

1. Sæt 8 stykker burrebånd ind i udskæringerne i skumpladen. Enderne skal stritte ud på den side af pladen, hvor der ingen Vendlet logo er. **2.** Hæv motorrullen og fjern træklaget. **3.** Før skumpladen ind i sengehesten fra indersiden. Siden med Vendlet logoet skal vende ind mod sengen.



4



5

4. Lad skumpladen falde ned på plads.
5. Saml burrebåndene omkring mellemstængerne i sengehesten. Gentag processen på modsatte side. Monter til sidst træklaget igen.

Rengøring

Skumplader og burrebånd kan rengøres med varmt vand tilsat almindelige rengøringsmidler.

Afsprøjtning er også muligt, dog kan det med tiden medføre misfarvning/afblegning af pladerne.